

SOFÁ ORTOPÉDICO EV2001 INDICO

Finalidade:

É importante adaptar a casa quando se tem uma pessoa com deficiência ou uma pessoa com mobilidade reduzida. Estas pessoas têm frequentemente problemas de mobilidade e, por conseguinte, passam muito tempo sentadas. Para tornar a sua vida mais confortável, é muito importante ter um sofá/cadeira adaptado às suas necessidades, quer seja para relaxar ou descansar.

Características:

Motor único sem extensão de pé. Peso máximo: Utilizadores até 145 kg.

Medidas:

Largura do assento : 49cm;
Profundidade do assento : 49cm;
Altura do assento : 49cm;
Largura total: 75cm;
Profundidade total : 82cm;
Altura do encosto: 70cm;
Altura do apoio de braços: 18cm;
Altura da cadeira: 107cm;
Tamanho da embalagem: 83x76x65cm;

Lote: Ver embalagem

Cor: Camel

Data de fabrico: Ver embalagem

Modelo: EV2001 Indico

Marca: EvoluXion

Mandatário: Evoluxion Health

Morada: Rua Hermano Neves, 18 - 3º Piso - E7

160-477 Lisboa, Portugal

Distribuidor: Gerimais, Lda

Vendedor: Ortovismed, Lda

Manutenção e conservação:

Não exceda o peso máximo recomendado para o utilizador.

Tenha muito cuidado na presença de crianças ou animais de estimação.

Não permita que as crianças se coloquem debaixo da cadeira, utilizem a cadeira ou brinquem com a cadeira, uma vez que tal pode causar ferimentos quando o apoio de pernas se dobra para baixo.

Não mova a cadeira quando esta estiver numa posição deitada, quando a cadeira estiver ligada à fonte de alimentação e/ou em serviço. Certifique-se de que não existem cabos presos.

Instruções de utilização:

A cadeira é entregue totalmente montada, com exceção do encosto, que é fácil de montar na cadeira.

As quatro rodas da cadeira tocam no chão quando a cadeira está na posição sentada (a cadeira pode ser deslocada). Os dois rodízios dianteiros são bloqueados quando a função de elevação é utilizada.

Imagem do produto:

