

SOFÁ ORTOPÉDICO EV2003 MEDITERRANEO

Finalidade:

É importante adaptar a sua casa quando tem uma pessoa com deficiência ou uma pessoa com mobilidade reduzida. Estas pessoas têm muitas vezes problemas de mobilidade e passam, por isso, muito tempo sentadas. Para tornar a sua vida mais confortável, é muito importante ter um sofá/cadeira adaptado às suas necessidades, quer seja para relaxar ou descansar.

Características:

Tem uma estética arredondada, com braços fixos e firmes para sentar e levantar com maior segurança e estabilidade.

O seu design oferece um bom apoio na região lombar, ajudando a aliviar a pressão na zona lombar e a promover uma postura correcta.

A reclinção permite diferentes posições de descanso, o que pode ser benéfico para quem precisa de mudar de posição com frequência. Tem rodas para facilitar a deslocação na sala. Possui um motor duplo para efetuar as funções de elevação e reclinção.

O encosto e o apoio para os pés extensível funcionam de forma independente e eléctrica através de controlo remoto. Tem uma função de massagem vibratória e aquecimento na zona lombar.

Peso máximo: Utilizadores até 160 kg

Medidas:

Largura do assento: 54cm;

Profundidade do assento: 52cm;

Altura do assento: 50cm;

Largura total: 89,5cm;

Profundidade total: 89cm;

Altura do encosto: 72cm;

Altura do apoio de braços: 17cm;

Altura da cadeira: 109cm;

Tamanho da embalagem: 2 uni - 80x60x35cm e 90x90x65cm;

Lote: Ver embalagem

Color: Castanho claro

Data de fabrico: Ver embalagem

Modelo: EV2003B Mediterraneo

Marca: EvoluXion

Mandatário: Evoluxion Health

Morada: Rua Hermano Neves, 18 - 3º Piso - E7

160-477 Lisboa, Portugal

Distribuidor: Gerimais, Lda

Vendedor: Ortovismed, Lda

Manutenção e conservação:

Não exceda o peso máximo recomendado para o utilizador.

Tenha muito cuidado na presença de crianças ou animais de estimação.

Não permita que as crianças se coloquem debaixo da cadeira, utilizem a cadeira ou brinquem com a cadeira, uma vez que tal pode causar ferimentos quando o apoio de pernas se dobra para baixo.

Não mova a cadeira quando esta estiver numa posição deitada, quando a cadeira estiver ligada à fonte de alimentação e/ou em serviço.

Certifique-se de que não existem cabos presos.

Instruções de utilização:

A cadeira é entregue totalmente montada, com exceção do encosto, que é fácil de montar na cadeira.

As quatro rodas da cadeira tocam no chão quando a cadeira está na posição sentada (a cadeira pode ser deslocada). Os dois rodízios dianteiros são bloqueados quando a função de elevação é utilizada.

O encosto e o apoio para os pés são accionados separadamente. Esta cadeira deve ser colocada a uma distância mínima de 28" da parede e manter o espaço frontal da cadeira livre para o funcionamento diário.

O apoio de cabeça ajustável com motor proporciona uma posição sentada e reclinável sem limites para o máximo conforto e descontração.

Almofada de aquecimento equipada no interior do assento, proporciona um calor extra quando é necessário!

Aparelho altamente integrado, fácil de utilizar por todos os utilizadores.

Imagens do produto:

