

SOFÁ ORTOPÉDICO EV2002 PACIFIC

Finalidade

É importante adaptar a sua casa quando tem uma pessoa com deficiência ou uma pessoa com mobilidade reduzida. Estas pessoas têm muitas vezes problemas de mobilidade e passam, por isso, muito tempo sentadas. Para tornar a sua vida mais confortável, é muito importante ter um sofá/cadeira adaptado às suas necessidades, quer seja para relaxar ou descansar.

Características:

Duplo motor, apoio de pés extensível.
Função de massagem vibratória e aquecimento lombar.
Função de elevação e reclinación eléctrica.
Peso máximo: Utilizadores até 150 kg

Medidas:

Largura do assento: 50cm;
Profundidade do assento: 53cm;
Altura do assento: 48cm;
Largura total: 70cm;
Profundidade total: 88cm;
Altura do encosto: 68cm;
Comprimento total: 169cm;
Altura da cadeira: 112cm;
Altura do apoio para os pés: 40,5cm;
Elevação da cadeira: 30º
Ângulo de inclinação: 170º
Tamanho da embalagem: 79x76x65cm;

Lote: Ver embalagem

Cor: Cinzento escuro

Data de fabrico: Ver embalagem

Modelo: EV2002 Pacific

Marca: EvoluXion

Mandatário: Evoluxion Health

Morada: Rua Hermano Neves, 18 - 3º Piso - E7

160-477 Lisboa, Portugal

Distribuidor: Gerimais, Lda

Vendedor: Ortovismed, Lda

Manutenção e conservação:

Não exceda o peso máximo recomendado para o utilizador.

Tenha muito cuidado na presença de crianças ou animais de estimação.

Não permita que as crianças se coloquem debaixo da cadeira, utilizem a cadeira ou brinquem com a cadeira, uma vez que tal pode causar ferimentos quando o apoio de pernas se dobra para baixo.

Não mova a cadeira quando esta estiver numa posição deitada, quando a cadeira estiver ligada à fonte de alimentação e/ou em serviço.

Certifique-se de que não existem cabos presos.

Instruções de utilização:

A cadeira é entregue totalmente montada, com exceção do encosto, que é fácil de montar na cadeira.

As quatro rodas da cadeira tocam no chão quando a cadeira está na posição sentada (a cadeira pode ser deslocada). Os dois rodízios dianteiros são bloqueados quando a função de elevação é utilizada.

Imagens do produto:

